



自動はかりの組立マニュアル

■各部の名称とはたらき

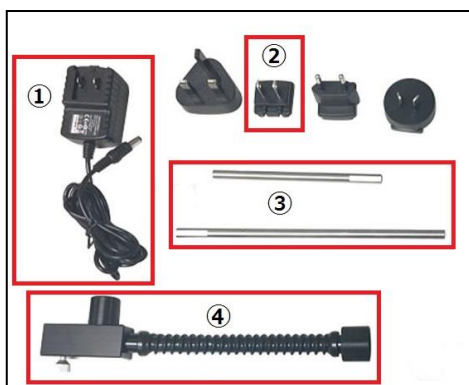

- ①電源プラグ
- ②電源コネクタ(赤枠の指定品を使用して下さい)
- ③ホースアダプター
- ④呼吸ホース(③と合わせて使用します)

自動はかり本体の機能は以下の通りです。

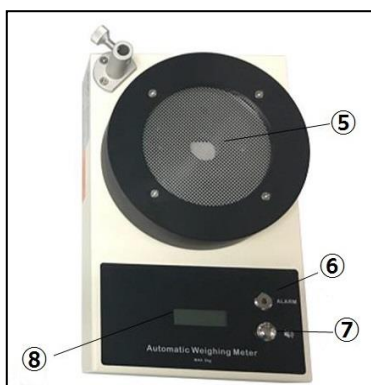

- ⑤計量土台
- ⑥アラームランプ
- ⑦ミュートボタン
- ⑧表示ディスプレイ
- ⑨固定部(③のホースアダプターを固定する際に使用します)
- ⑩電源スイッチ
- ⑪アダプターソケット(①の電源プラグをここに挿し込みます)
- ⑫リセットボタン



■組み立て手順

1. 部品の②を①に接続して、⑪に挿し込みます
2. ⑩の電源スイッチを「ON」にしますと自動はかりが起動します



3. ⑨の固定部に③のホースアダプターを挿して、③にネジで固定する為の平たい部分がありますので、それに合わせて⑨に付いているネジを回して固定します
4. 続いて③のホースアダプターの上側に、④の呼吸ホースを下図の様な向きで挿し込み上記と同じように④にネジ回しがありますので固定して下さい



5. 電源が ON の状態で、⑤の計量土台に麻醉余剰ガス吸着缶 (小または大) を置きまして、缶の上部にある管に④の呼吸ホースをはめ込みます
※必要に応じて④の呼吸ホースに排気管を繋いで下さい

6. パネルを使用する場合には画像の様な形で向きに注意して固定、使用して下さい



■動作確認

自動はかり本体にある⑥アラームランプと⑦のミュートボタン、及び⑫のリセットボタンの使い方を以下に説明します。

●アラームランプ

⑤の計量土台に日測定物を置くと⑧の表示ディスプレイに計測値が表示されます。その値が 4kg 以上となりますと、アラームランプが点灯し、警告音がなります

●ミュートボタン

⑥のアラームランプの警告音を消すことが出来ます。実行すると 30 分続き、その後元の状態に戻ります

●リセットボタン

計量をリセットして値を計測する場合に 3 秒ほど長押しすると⑧の表示ディスプレイに「OK」と表示され、計測値が 0 となります

※表示ディスプレイに「ERR」と表示された場合にはメモリ障害または過度の重量エラーが原因である可能性があります