

# BSパルスオキシメータ AM802



血中酸素  
飽和度測定



脈拍測定



見やすい  
液晶表示



自動電源OFF  
(約8秒後)




**クリップに指を挟んでボタンを押すだけ！**

わずか4秒で、血中酸素飽和度と脈拍数を簡単測定。  
スピーディー＆正確に健康管理をサポートします。

- 軽量でコンパクトなため、持ち運びや収納に便利
- ワンボタンで血中酸素飽和度と脈拍数のスポット・連続測定ができます。
- SpO<sub>2</sub>、または脈拍数が基準範囲を下回ると表示が点滅してお知らせ
- 見やすくはっきりした液晶ディスプレイ表示
- 外来・病棟でのルーティンチェック、家庭での健康チェックに
- 計測終了後、約8秒で自動電源OFF。バッテリーが長持ちします。

## ◆本体外観／液晶画面

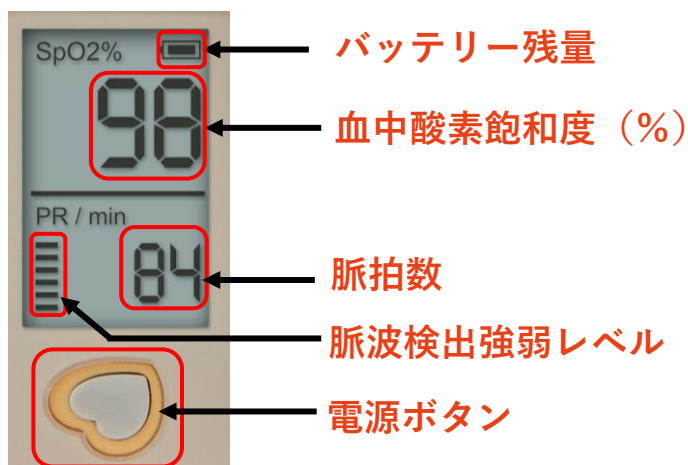

## ◆測定方法

- ・指先をプローブの中央にまっすぐ差し込み、爪の根元（半月部分）にLEDセンサーが当たるようにしてください。
- ・指先が冷えているなど、血流が悪い場合、正しく測定できません。  
また、マニキュアやネイルが光を遮ると測定が不正確になるため、あらかじめ取り除いてから使用してください。

## 製品仕様

| 薬事分類                      |      | クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器               |                    |                           |
|---------------------------|------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 製品名                       |      | BS パルスオキシメータ                          | 認証番号               | 304ALBZX00007000          |
| 型式                        |      | AM 802                                | LED波長              | 約660 nm、約905 nm           |
| 機能的<br>血中酸素<br>飽和度<br>(%) | 測定精度 | 90 ~ 100 % : ±2 %<br>70 ~ 89 % : ±3 % | 表示部                | 液晶画面                      |
|                           | 表示範囲 | 70 ~ 99% : ±3 %                       | 電源の種類              | 内部電源機器                    |
|                           | 表示単位 | 1 %                                   | 装着部の保護             | BF 形装着部                   |
| 脈拍数                       | 測定精度 | ±3 bpm                                | 防滴仕様               | IPX2                      |
|                           | 測定範囲 | 30 ~ 250 bpm                          | 電源                 | DC3.0V<br>(単4アルカリ電池 × 2本) |
|                           | 表示単位 | 1 bpm                                 | サイズ<br>(L × W × H) | 61 × 34 × 30.5 mm         |
|                           |      |                                       | 重量                 | 31.5 g                    |

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

[www.bitstrong.co.jp](https://www.bitstrong.co.jp)