

# bitstrong 歯科用医療機器カタログ



# bitstrong

## 歯科用医療機器カタログ

### 目次

1. BS New ミキシングチップ（50ml 印象材カートリッジ用）単回使用 .....	3
2. BS オーラルチップ（BS New ミキシングチップ用先端チップ）単回使用 .....	3
3. BS New ミキシングチップ（6ml など小容量カートリッジ用）単回使用.....	4
4. BS オーラルチップ（小容量カートリッジ用ミキシングチップ先端チップ）単回使用.....	4
5. BS スマートジル バイト（ハードボディ印象材） .....	5
4. BS New スマート ガン（50ml 印象材カートリッジ用ミキシングガン .....	7
5. BS ミラーシステム（サクション機能付きデンタルミラーシステム） .....	8
6. BS シリンジ用キャピラリーチップ（根管洗浄用シリンジ先端チップ）単回使用 .....	10

## 1. BS New ミキシングチップ<sup>®</sup>（50ml 印象材カートリッジ用）単回使用

型番：BS-DENT-MT-S100

入数：50 個入/袋

製造販売届出番号：13B2X10446000401

### 適応使用印象材：

- |                        |
|------------------------|
| ● S143 イエロー            |
| ライトボディ印象材              |
| ● S132 ピンク             |
| レギュラー/ヘビーボディ/モノフェース印象材 |
| ● S144 グリーン            |
| ヘビーボディ印象材              |
| バイト咬合採得印象材             |
| ● S133 ブルー             |
| コア材、セメント材              |



### BS New ミキシングチップ<sup>®</sup>の特長：

- 溝による位置決めが必要が無く、簡単に取り付け可能。
- 2 つの突起で漏れ防止。（特許取得）
- S143、S144 は、従来製品（S130、S131）に対して 38%材料をセーブ。

## 2. BS オーラルチップ<sup>®</sup>（BS New ミキシングチップ<sup>®</sup>用先端チップ<sup>®</sup>）単回使用

型番：BS-DENT-OT-S100

入数：50 個入/袋

製造販売届出番号：13B2X10446000402

### BS New ミキシングチップ<sup>®</sup>との適応：

- S115 イエロー  
S143・S133・（S130）
- S116 ホワイト  
S132
- S119 コア・オーラルチップ-Y  
S143・S133・（S130）
- S122 バイト・オーラルチップ<sup>®</sup>  
S144・（S131）



### BS オーラルチップ<sup>®</sup>の特長：

- 適量の印象材を任意の患部に吐出できます。
- S122 は薄く、広く印象材をトレイに広げることができます。
- S119 は曲げられるステンレス針で微量の印象材、コア材を任意の患部に吐出できます。

※S130、S131 は弊社では扱っておりません。

### 3. BS New ミキシングチップ<sup>®</sup>（6ml など小容量カートリッジ用）単回使用

型番：BS-DENT-MT-S100

入数：50 個入/袋

製造販売届出番号：13B2X10446000401

適応使用材料：

- S123・ S124・S125

コア材、レジンセメント材料  
ライトボディ印象材



S123

S124

S125

BS New ミキシングチップ<sup>®</sup>の特長：

- 溝による位置決めが必要が無く、簡単に取り付け可能。
- 2 つの突起で漏れ防止。（特許取得）

### 4. BS オーラルチップ<sup>®</sup>（小容量カートリッジ用ミキシングチップ<sup>®</sup>先端チップ）単回使用

型番：BS-DENT-OT-S100

入数：50 個入/袋

製造販売届出番号：13B2X10446000402

BS New ミキシングチップ<sup>®</sup>との適応：

- S146 エンドオーラルチップ  
S123・ (S140)
- S117 コア・オーラルチップ  
S123・ (S140)
- S120 コア・オーラルチップ-B  
S123・ (S140)



S146

S117

S120

BS オーラルチップ<sup>®</sup>の特長：

- 適量の印象材を任意の患部に吐出できます。
- S120 は曲げられるステンレス針で微量の印象材、コア材を任意の患部に吐出できます。

※S140 は弊社では扱っておりません。

#### 4. BS スマートジル バイト (ハードボディ印象材)

型番 : BS-DENT-SSB-2

製造販売届出番号 : 13B2X10446000403



#### 包装内容 :

- 1 箱内 : カートリッジ 50mL × 2本  
 ミキシングチップ S131(グリーン) × 6本

#### 適用 :

- ピストンを押すため BS New スマート ガンに装着します。
- 先端に、ミキシングチップ S144、S132、S131 を装着して主剤と硬化剤を混練して押し出します。
- ミキシングチップの先端にバイト・オーラルチップ S122 を装着すると、印象材トレイなどに薄く、広く押し出すことができます。(以上画像 1)



画像 1

#### BS スマートジル バイトの特長 :

- 保持期間 30 秒の短時間で作業が終了でき、1 分で完全に硬化します。
- 精密咬合採得に適した硬度 A89 のハードボディタイプです。

## 5. BS New スマート ガン (50ml 印象材カートリッジ用ミキシングガン)

型番 : BS-DENT-NSG

入数 : 1 個入/箱

製造販売届出番号 : 13B2X10446000404



### 適用 :

- 50ml の 2 液硬化型印象材カートリッジに装着し、カートリッジのピストンを押し出します。(画像 2)

### BS New スマート ガンの特長

- 印象材の安定した混合練成ができ、完璧な印象、採得の結果を得らやすく
- 使いやすい軽量設計です。
- 軽量ながら重要部には金属素材を使用して、耐久性に優れています。(画像 3)



画像 2



画像 3

## 6. BS ミラーシステム (サクション機能付きデンタルミラーシステム)

製造販売届出番号：13B2X10446000405

### 1 ミラーシステムセット

#### ●吸引孔付きミラー本体 5 本セット (BS-DENT-S9000-5)

吸引孔付きミラー本体	×5
吸引ホース	×2
吸引バルブ接続アダプター	×3
(11mm、16mm、18mm)	
クリーニングブラシ	×1
Oリング	×2



#### ●吸引孔付きミラー2 本セット (BS-DENT-S9000-2)

吸引孔付きミラー本体	×2
吸引ホース	×1
吸引バルブ接続アダプター	×1 (11mm)
クリーニングブラシ	×1
Oリング	×1



### 2 吸引孔付きミラー本体 (BS-DENT-S900-1)

1 本入/袋



### 3 吸引孔付きミラーヘッド (BS-DENT-S901-1)

6 個入/箱



**4 ミラーハンドル (BS-DENT-S901-1)**

1 本入/袋



**5 吸引ホース (BS-DENT-S901-2)**

1 本入/袋



**6 アダプター 11mm (BS-DENT-S905-1)**

1 個入/袋



**7 アダプター 16mm (BS-DENT-S905-2)**

1 個入/袋



**8 アダプター 18mm (BS-DENT-S905-3)**

1 個入/袋



**9 クリーニングブラシ (BS-DENT-S907-1)**

1 本入/袋



**適用：**

- アシスタントの手が足りない時でも、一人で唾液吸引をしながらミラーによる患部確認を可能にします。
- サクシジョンチューブが邪魔になり、患部が見にくい場合に活用できます。





## 特長：

- ミラーの8か所のサククション孔で、舌や口腔内の表皮を吸い込まずに吸引できます。
- 防曇処理をした表面蒸着ミラーでクリアな画像が得られます。
- 吸引孔付きミラー本体（吸引孔付きミラーヘッドミラーヘッド、ミラーハンドル）、吸引ホースはオートクレーブ滅菌可能なため安全に使用できます。
- 吸引孔付きミラー本体（吸引孔付きミラーヘッドミラーヘッド、ミラーハンドル）は、クリーニングブラシで内部が洗浄できるため、清潔に使用できます。
- 3種のアダプターにより、様々な吸引バルブと接続できます。
- ミラーシステムセットには、歯科ユニットのバルブを持ち上げたときの自動オフ機能を解除するためのOリングが付属しています。

**交換可能なミラーヘッド**

- ・ガラス前面鏡面加工
- ・防曇加工

11mm 16mm 18mm

**高い互換性**

11mm、16mm、18mm径のアダプターにより、多数のユニットチェアに対応できます。セットには3種が付属しています。

**ハンドル**

触感が良く、滑りにくいシリコンゴムでカバーされています。

**8つのサククション孔**

- ・ミラー背面と側面に各4つの孔を効果的に配置
- ・優れたサククション性能
- ・サククション孔は舌や口腔上皮を吸引しにくい設計になっています。

**簡単洗浄**

- ・洗浄ブラシでミラーヘッド内部を洗浄できます。
- ・ミラーヘッド、ハンドル、ホースはオートクレーブ滅菌ができます。

**簡単設置**

現在ご使用のHVEバルブと簡単に接続できます。

## 7. BS シリンジ用キャピラリーチップ（根管洗浄用シリンジ先端チップ） 単回使用

型番：BS-DENT-FT-S（ストレート） / BS-DENT-FT-C（カーブ）

入数：50 個入/袋

製造販売届出番号：13B2X10446000406



S121-S S121-C

### 用途：

- 1 ルアーコネクターシリンジに装着し（画像 4）
  - 根管への薬液の注入。
  - 根管への水酸化カルシウムペーストなどの低調度ペースト等の注入。
  - 根管への流動性複合材料の注入。
  - 口腔、歯髄腔、根管などの洗浄。
- 2 吸引バルブ用ルアーコネクター付きアダプター（※弊社では扱っておりません）に装着し（画像5）
  - ユニットに接続し、歯内、根管内の液体、唾液等の吸引除去および乾燥。



画像 4



画像 5

### 特長：

- 細く柔軟な形状により、根管内に深く挿入できます。
- ルアーコネクターにより確実に装着できます。

**発売元：株式会社ビットストロング 製品営業部**

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002 東京都文京区小石川 2-25-16

小石川パーソナルハウス

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせ：[Imaging@bitstrong.co.jp](mailto:Imaging@bitstrong.co.jp)